

Resumen del producto: Asiento de posicionamiento portátil Moti Start

El asiento de posicionamiento portátil Moti-Start es una silla de apoyo ajustable. Está destinado a ser utilizado por bebés que necesitan apoyo postural adicional. Viene semi-ensamblado y es fácil de transportar y tiene muchas características, como una bandeja ajustable y reposacabezas, y un asiento reclinable en el espacio. El producto está diseñado para usarse en el piso, pero se puede colocar en una superficie más alta si la superficie es lo suficientemente grande y estable como para ser seguro. El producto se distribuye a través de una red de socios de servicio de Motivation en todo el mundo.

	Asiento de posicionamiento portátil Moti-Start
Código de producto	WMSSG1-P-01
Descripción del producto	Asiento de posicionamiento portátil
Manufactura	Hecha en China bajo licencia de Motivation
Emisión de Documentos	9
Fecha de emisión	Septiembre 2014




Información General

- El asiento de posicionamiento portátil Moti-Start es una silla pediátrica ajustable en tamaño.
- La Moti-Start es la silla más pequeña en una gama de tres sillas que se adaptan a diferentes tamaños de niños (las otras dos son Moti Go Medium y Large).
- Tiene un marco de madera contrachapada, con tapicería duradera y componentes de soporte postural ajustables.
- Tiene ocho posiciones de inclinación ajustables diariamente.
- La silla ha sido diseñada de manera que las partes sean fáciles de reemplazar, mantener, reparar o personalizar.
- Puede usarse en la casa o ser transportada fácilmente, por ejemplo, para usarse en la escuela o visitar amigos y familia.
- Un asiento de posicionamiento en caja semi ensamblado que se puede ensamblar y ajustar completamente para satisfacer las necesidades individuales del niño.
- Las sillas necesitan montaje y preparación final y recomendamos que sean ensambladas por profesionales y ensambladores capacitados para cada usuario.
- La silla ha sido diseñada para permitir la modificación individual de los componentes de soporte postural para acomodar o corregir problemas con la postura.¹
- El embalaje está diseñado para un fácil desmontaje para reciclaje o reutilización.



¹ La capacitación de nivel de servicio intermedio proporciona habilidades para prescribir y fabricar modificaciones de soporte postural

Grupo de usuarios del producto

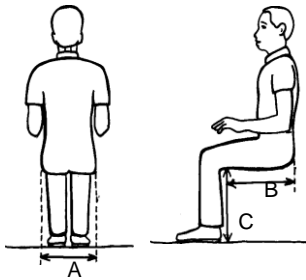

- La Moti-Start es para niños pequeños de aproximadamente 6 meses a 2 años de edad, dependiendo de las medidas del cuerpo.
- La Moti-Start es adecuada para usuarios cuyas medidas corporales están dentro de los siguientes rangos:
 - A. Ancho de cadera: 140-240mm
 - B. Glúteos a la parte posterior de la rodilla: 190-300
 - C. Altura de la parte posterior de la rodilla desde la planta de los pies: 160-260mm
- Peso máximo del usuario: 25kg (55lbs)

Entorno

- El asiento posicionador está diseñado para usarse en interiores, sobre el suelo o una superficie plana. Se puede mover fácilmente de una habitación a otra usando el "asa de agarre" en la parte delantera o la correa de remolque y se puede usar donde el espacio es limitado.
- La silla se puede plegar fácilmente y es ligera de peso.
- Aunque la silla de ruedas es principalmente para uso en interiores, también es adecuada para uso en exteriores.

Ajustes del asiento posicionador




Ancho de almohadilla de cadera*	140-240mm * Rango alcanzado al agregar o reducir la espuma de las almohadillas de cadera ajustables
Profundidad de asiento	160-270mm
Ángulo del respaldo	El ángulo entre el respaldo y el asiento es siempre de 90 grados.
Altura del respaldo	260-345mm
Ángulos de inclinación diarios	Elección de ocho posiciones desde respaldo vertical hasta 17 grados de inclinación hacia atrás. Rápido y fácil de ajustar sin herramientas manuales.
Altura reposapiés	160-260mm
Ángulo reposapiés	Paralelo al ángulo del asiento
Soportes Laterales de Tronco: ancho	120-180mm
Soportes Laterales de Tronco: altura*	130-250mm * Medido desde la parte superior del asiento hasta la parte superior del soporte
Soportes Laterales de Tronco: adelante/ atrás	2 opciones, hacia adelante y hacia atrás, rango 45mm
Altura reposacabeza	310-420mm
Posición reposacabeza*	60mm *30mm ajuste hacia adelante o hacia atrás desde la posición estándar

Ancho abductor *	25 – 110mm * Se puede modificar individualmente derecha e izquierda
Altura de bandeja	Bandeja de madera barnizada con tapa de espuma EVA antideslizante (Etileno acetato de vinilo). Altura ajustable 110-180mm
Bandeja Adelante/atrás*	Profundidad ajustable 100mm * El corte estándar se puede aumentar en ancho y profundidad para que coincide al usuario cortando la superficie de la bandeja (y barnizando el borde cortado)

Especificaciones de Funcionamiento

Respaldo	Altura ajustable. Almohadilla de espuma de poliuretano dentro de una funda lavable resistente al agua. Base de madera barnizada de 15 mm.
Soportes de tronco	Ancho, longitud y altura ajustable. Almohadillas cubiertas con espuma de EVA (Etileno acetato de vinilo).
Abductor	Abductor extraíble con superficie exterior de espuma EVA (Etileno acetato de vinilo) (altamente resistente al agua). Rápido y fácil de poner y quitar, sin usar herramientas manuales.
Cojín	Cojín con función de barra pre isquial de longitud ajustable, dentro de una funda lavable resistente al agua. El cojín y la funda son fácilmente extraíbles (sin herramientas manuales) para su limpieza y ajuste.
Ciclo de vida	El producto está diseñado para proporcionar al menos 3 años de servicio, durante el uso normal y siempre que tenga el mantenimiento adecuado.
Manijas de empuje	Para transportar el producto cuando la silla está vacía.
Ruedas	Las pequeñas ruedas traseras de madera en combinación con el asa de transporte y la correa de remolque proporcionan movilidad de corta distancia para este producto.
Asiento	Base de asiento plano de madera barnizada de 12 mm (debajo del cojín).
Reposacabeza	Reposacabezas contorneado con funda de algodón lavable y extraíble. Reposacabezas ajustable en altura y profundidad. La forma contorneada del reposacabezas se puede modificar fácilmente si es necesario.
Correas	La silla se suministra con correas para hombros, pelvis y tobillos. También se suministra una correa de remolque para ayudar con la movilidad de la silla a corta distancia.
Estándares	Este producto es certificado ISO 9001 (2008- 2013) e ISO 13845 (2008-2013).
Acabado	Los componentes metálicos son galvanizados o pasivados. Los componentes de madera están acabados con barniz de grado exterior.
Transporte /almacenaje	La silla es plegable.

Detalles de la caja	Dimensiones de la caja: 735 x 440 x 360 mm. Peso bruto: 10.9 Kg Cartón liso de cinco capas de color marrón con gráficos impresos en negro. El embalaje no es resistente al agua. Dimensiones exteriores: 740X460X370 mm.
Peso	Peso neto de la Moti-Start: 9.3 Kg
Cuidado y mantenimiento	Este producto viene con un Kit de herramientas de usuario, que contiene herramientas manuales básicas para facilitar que se realicen procedimientos básicos de cuidado y mantenimiento en el producto.
Partes de repuestos	Hay disponibles paquetes estándar de piezas de repuesto y se puede proporcionar una lista detallada de piezas de repuesto por pedido.

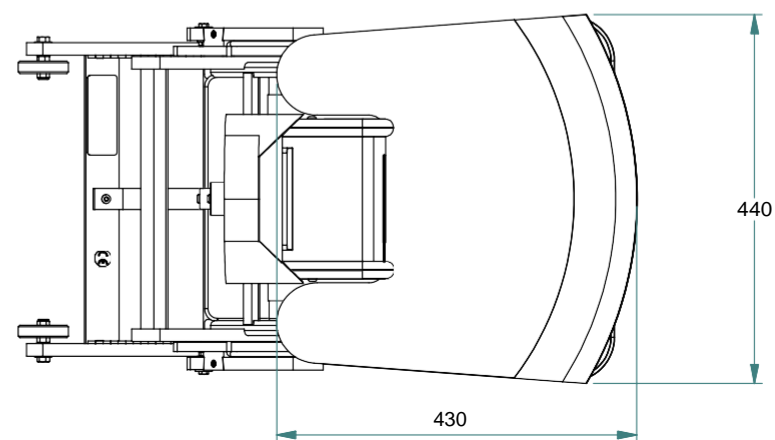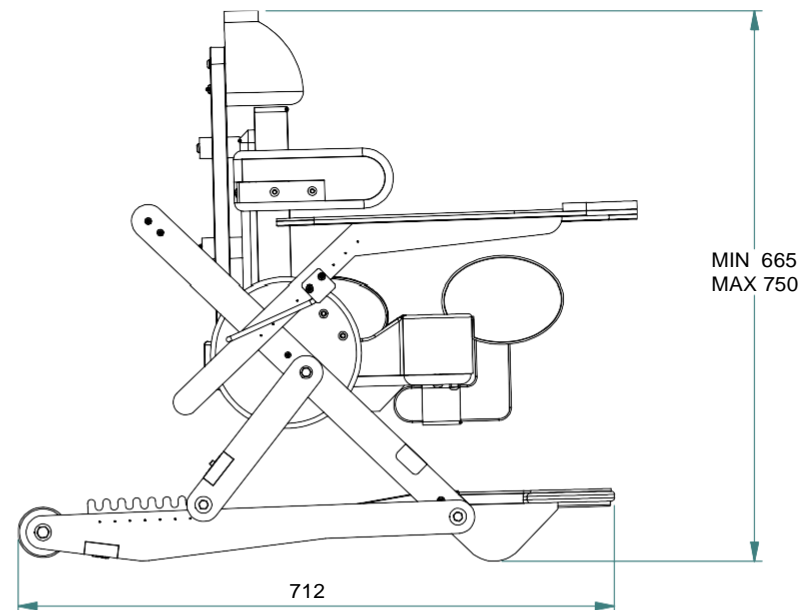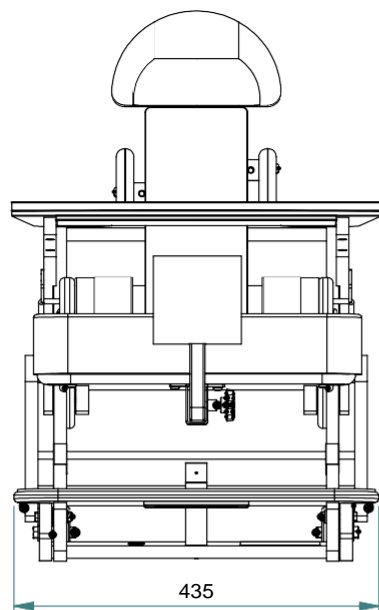

Resumen del producto: Asiento de posicionamiento Moti Start